



Urufarma

Garantía de Calidad

Laboratorio Urufarma S.A. garantiza la calidad de las tiras reactivas EVATEST contra todo defecto de fabricación. Con la presentación de esta garantía, el estuche y la tira reactiva en donde no se haya marcado el control de función (la línea superior en la zona de resultado) y tras nuestra inspección, se reemplazará - sin cargo - la tira que muestre defectos de calidad. Esta garantía no cubre los defectos causados por el manejo inadecuado del producto o que se haya apartado de las instrucciones de uso.

OTROS PRODUCTOS DE LA LÍNEA EVATEST

EVATEST Easy. TEST DE EMBARAZO EN UN MINUTO.

- EVATEST Easy puede realizarse un día antes de la fecha estimada del comienzo del periodo menstrual.
- Exactitud superior al 99 %.



EVAPLAN. TEST DE OVULACIÓN EN UN PASO.

- EVAPLAN predice en sólo 3 minutos el período de mayor fertilidad.
- Exactitud superior al 99 %.



TEST PRIVADO DE EMBARAZO EN UN PASO

EVATEST



Urufarma

PARA HACER EN CUALQUIER MOMENTO DEL DÍA

EVATEST

EVATEST es un test de embarazo para ser realizado en forma privada, desde un día antes de la fecha estimada de menstruación y con la orina de cualquier momento del día (con una retención mínima de 3 hs.)

EVATEST le puede indicar en tan sólo 5 minutos si está embarazada o no, con una total confiabilidad en su resultado.

DESCRIPCIÓN DEL TEST

La hCG (Gonadotrofina Coriónica Humana) es una hormona segregada por la placenta poco tiempo después de ocurrida la fecundación. La aparición y el incremento rápido de la concentración de esta hormona en la orina de la madre, hacen de la β -hCG (subunidad β de la hCG) el indicador perfecto para la confirmación de la existencia del embarazo.


La avanzada tecnología de EVATEST involucra la detección de la β -hCG en la orina mediante el uso de anticuerpos monoclonales marcados con sales de oro con un alto grado de sensibilidad y una total confiabilidad en su resultado.

No abrir el envoltorio que contiene el test antes de su uso.

INSTRUCCIONES DE USO

Antes de abrir el envase, lea detenidamente las instrucciones de uso.


- 1. Llene el recipiente con la orina de cualquier momento del día (es necesaria una retención mínima de 3 hs.).

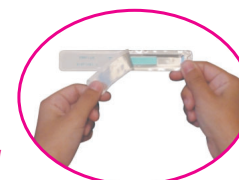

• Fig. 1

- 2. Abra el envase (con la marca EVATEST impresa). Encontrará una tira reactiva y un sobrecito anti-humedad que no debe ser utilizado en el test. (ver Fig. 1)

- 3. Tome la tira reactiva solamente por el extremo azul. (ver Fig. 2)

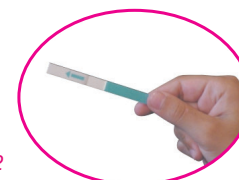

• Fig. 2

- 4. Introduzca la tira reactiva insertándola en la ranura del recipiente con la flecha orientada hacia abajo. Ninguna parte de la flecha deberá tocar la orina. (ver Fig. 3)



• Fig. 3

- 5. Deje la tira reactiva en esta posición durante 5 minutos. Luego, retirela de la orina y lea el resultado.

BIBLIOGRAFÍA

1. Lenton, E.A., Neal, L.M., and Sulaiman, R.; Fertil. Steril.; Vol. 37, p. 773; 1982.
2. Armstrong, E.G., Ehrlich, P.H., Birken, S., Schlatterer, J.P., Siris, E., Hembree, W.C. and Canfield, R.E.; J. Clin. Endocrinol. Metab.; Vol. 59, p.867; 1984.
3. Batzer, F.R.; Fertil. Steril.; Vol. 34, p. 1; 1980.
4. Catt, K.J., Duran, M.L. and Vaitukaitis, J.L.; J. Clin. Endocrinol. Metab.; Vol. 40, p. 537; 1975.
5. Braunstein, G.D., Rasor, J., Danzer, H., Alder, D., and Wade, M.E.; Am. J. Obstet. Gynecol.; Vol. 126, p. 678; 1976.
6. Braunstein, G.D., Vaitukaitis, J.L., Carbone, P.P., Ross, G.T., and Wade, M.E.; Ann. Intern. Med.; Vol. 78, p. 39-45; 1973.
7. Bawood, M.Y., Saxena, B.B., and Landesman, R.; Am. J. Obstet. Gynecol.; Vol. 50, p. 172; 1977.
8. Galfre, G., Howe, S.C., Milstein, C., Butcher, G.W., and Howard, J.C.; Nature; Vol. 266; p. 550; 1977.

Contenido del envase:

La caja contiene en su interior:

- 1 envoltorio de aluminio cerrado herméticamente en cuyo interior hay 1 tira reactiva (para 1 test) y 1 sobrecito anti-humedad que no debe ser utilizado en el test.
- 1 recipiente para la recolección de orina.
- 1 manual de instrucciones.

El producto podrá ser utilizado una única vez debiendo ser descartado con posterioridad a su uso.



Urufarma

Elaborado por: Syntron Bioresearch, Inc - USA
Importado por **Urufarma S.A.**
Monte Caseros 3260
Montevideo - Uruguay

LI-3888-03

LECTURA DEL RESULTADO

IMPORTANTE:

Los colores de las líneas de resultado representados en este Manual son orientativos.

• RESULTADO NEGATIVO


Una sola línea de color significa que Ud. no está embarazada.

• RESULTADO POSITIVO


Dos líneas de color significan que Ud. está embarazada (**independientemente de la intensidad del color**).

• TEST INVALIDO


La ausencia de la línea superior de color indica que el test no ha sido realizado correctamente o que no se mantuvieron las condiciones apropiadas para la conservación de las tiras.

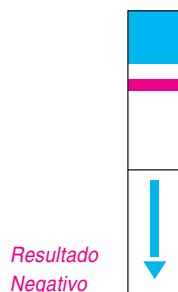

Resultado Negativo

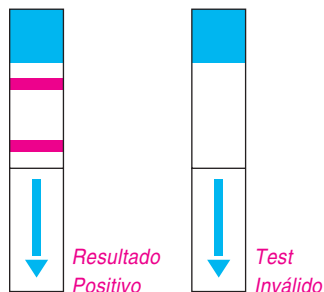

Resultado Positivo

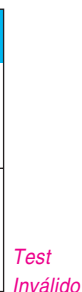

Test Inválido

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Ciertas condiciones médicas tales como quistes ováricos o embarazos ectópicos pueden llevar a resultados incorrectos.

Luego de un parto el test puede arrojar resultados positivos falsos. La hCG también se encuentra aumentada en la enfermedad gestacional o trofoblástica.

La hCG puede tener niveles bajos durante los primeros días del embarazo y por lo tanto el test puede arrojar falsos resultados negativos.

En caso de sospechar un embarazo reciente, el test debería repetirse dos días después del primer resultado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EVATEST es una tira reactiva basada en la tecnología GAIA (Gold Adsorbed Immuno Assay).

Esta tecnología utiliza anticuerpos monoclonales, dirigidos contra la subunidad β -hCG, marcados con un coloide de oro. Estos anticuerpos se unen a la hCG y precipitan formando una línea coloreada.

• **Sensibilidad:** EVATEST puede detectar niveles de β -hCG a partir de 25 UI/L, medida contra el 3er. estándar internacional de O.M.S.

• **Exactitud:** Superior al 99 %.

• **Especificidad:** No tiene reacción cruzada con hLH (500 mUI/mL); FSH (1000 mUI/mL); TSH (1000 μ UI/mL).

• **Interferencias:** El test puede dar resultados positivos frente a la administración exógena de Gonadotropina Coriónica Humana y en algunos tipos de enfermedades no comunes. Consulte a su médico.

• **No tiene interferencias por:** Vitamina C; glucosa; proteínas; hemoglobina; Ácido acetil salicílico; cafeína; ampicilinas y anticonceptivos orales.

• **Condiciones de conservación del producto:** Almacenar entre +15°C y +28°C.

El producto es estable hasta la fecha de vencimiento, siempre que el envoltorio de aluminio no haya sido abierto.

Algunas preguntas y respuestas

1 ¿Cuándo se puede utilizar EVATEST?

La alta sensibilidad de **EVATEST** permite detectar la hormona del embarazo en la orina, desde un día antes de la fecha estimada del período menstrual.

2 ¿Debe usarse la primera orina de la mañana?

No necesariamente. La alta sensibilidad de **EVATEST** permite efectuar el test con la orina de cualquier momento del día. Para favorecer la concentración de la β -hCG se recomienda una retención de orina de 3 hs. como mínimo.

3 ¿Cual es la exactitud de EVATEST?

La exactitud de **EVATEST** es superior al 99 %.

4 ¿Es correcto el resultado si estoy tomando medicamentos?

El uso de preparados hormonales conteniendo Gonadotropina Coriónica Humana, puede alterar el resultado. **Ante cualquier duda recomendamos consultar con su médico.** No se han detectado interferencias por el uso de otros medicamentos.

5 ¿El tomar alcohol afecta el resultado?

No. La ingesta de bebidas alcohólicas no afecta el resultado.

6 ¿Qué debo hacer si mi test indica positivo?

Consultar con su médico sin demoras.

7 ¿Puede ser confuso mi resultado?

No. El test, realizado correctamente, es confiable. Las líneas en la zona de resultado son claras y definidas. En los casos de baja concentración de la hormona del embarazo, la línea inferior tendrá una coloración más suave, determinando de todos modos un resultado positivo. **Un resultado positivo es siempre definitivo.**

Frente a un resultado negativo obtenido dentro de la primera semana de atraso el test debería repetirse dentro de las 48-72 hs. con la primera orina de la mañana, debido a que algunas mujeres necesitan mayor tiempo para tener, en la orina, un nivel detectable de la hormona del embarazo.

El resultado no cambia aunque Ud. deje la tira reactiva en la orina por más de 5 minutos.

8 ¿Puedo recoger la orina primero en otro recipiente?

Sí, siempre y cuando se encuentre limpio y seco. Luego la orina debe ser volcada en el recipiente **EVATEST**.

9 ¿Para qué sirve el sobrecito anti-humedad que viene junto al EVATEST?

Este sobrecito sirve para evitar la humedad en el envase y mantener el **EVATEST** en óptimas condiciones. Esta es su única función. No debe utilizarse en el test y debe desecharse una vez abierto el envase.

Ensayo orientativo para la autodetección de hCG, sin valor diagnóstico.
Ante cualquier duda consulte a su médico.

Dudas o comentarios



0800 8133
FonoMujer



Si desea mayor información comuníquese
de Lunes a Viernes
9 a 17 hs

Disponemos de un folleto
"Consejos para embarazadas"
que le ayudará en esta nueva etapa.

Personal capacitado atenderá gustosamente su consulta en forma totalmente confidencial.